

HANDLEIDING GEBRUIK BI NOC ONE – BINOC FALCON

Zet uw loepbril altijd met twee handen op en af.

Vermijd contact met water. Zowel het optische systeem als het draadloze lichtstelsel is uitsluitend spatwaterdicht.

Spoel de loepbril nooit af onder de kraan.

Voorkom condensvorming in de loepen door grote temperatuurwisselingen. Laat de loepbril 's nachts niet in de auto liggen.

Ontdoe de loepbril en het lichtstelsel van vettigheid met microvezel doekje. (bijgeleverd)

Reinig loepbril en lichtstelsel met alcoholvrije ontsmettingsdoekjes. (bijgeleverd)

De loepen zijn op spanning aangebracht in de glazen en derhalve kwetsbaar. Pak de loepbril daarom nooit bij de loepen op.

De lampen zijn uitgerust met oplaadbare lithium ion batterijen. Indien u het lichtstelsel langdurig niet gebruikt, kunnen de batterijen leeglopen. Ter voorkoming hiervan dient u de lampen minimaal 1 x per week volledig op te laden.

Houdt bij het verwisselen van de lampen altijd één hand tegen de bovenkant van het montuur, terwijl u met de andere hand de lamp loskoppelt van de magneet. Om de lamp te verwijderen, klikt u de lamp met een vloeiende beweging naar boven toe van u af terwijl u de andere hand tegen het montuur gedrukt houdt.

